

Lea todas las instrucciones antes de empezar con la prueba.



PASO 1

- Lleve estas instrucciones, el conjunto de cepillos y la tarjeta de la prueba al baño.
- Tire de la cadena **ANTES** de la deposición.




PASO 2

- Después de la deposición, **NO ARROJE AL INODORO EL PAPEL HIGIÉNICO USADO**. Deséchelo en una de las bolsas de residuos de color azul proporcionadas.
- **NO TIRE DE LA CADENA** del inodoro después de la deposición.




PASO 3

- Levante la solapa marcada "LEVANTE AQUÍ PARA LA MUESTRA" en la tarjeta de la prueba, para descubrir los cuadrados blancos pequeños marcados con "1" y "2".

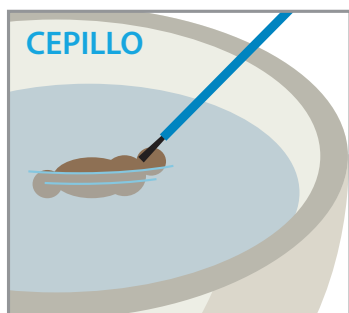


PASO 4

- Tome uno de los cepillos azules y cepille suavemente la superficie de las heces durante unos 5 segundos.
- Si las heces son blandas, simplemente remueva el agua que las rodea.
- Retire el cepillo del agua y sacúdalo suavemente una vez para eliminar el exceso de agua y cualquier resto sólido de heces.

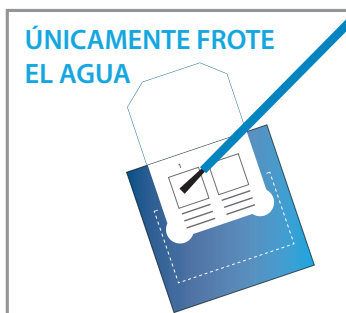

PASO 5

- Transfiera una muestra del **AGUA SOLAMENTE** frotando suavemente las cerdas del cepillo sobre el pequeño cuadrado blanco marcado "1" en la tarjeta de la prueba durante unos 5 segundos (puede aparecer alguna mancha en el recuadro).
- Deseche el cepillo usado en una de las bolsas de residuos de color azul y tírelo.

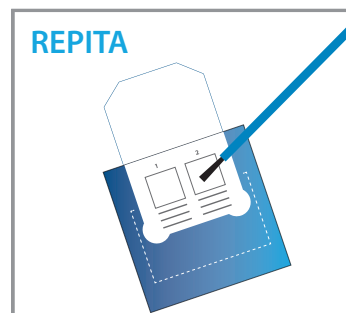


PASO 6

- Usando el segundo cepillo azul, repita el paso 4 y transfiera una segunda muestra de **AGUA** a la tarjeta de prueba frotando suavemente las cerdas del cepillo sobre el pequeño cuadrado blanco marcado "2" durante unos 5 segundos.
- Deseche el cepillo usado en la otra bolsa de residuos de color azul y tírelo en el cubo de la basura.



PASO 7

- **Escriba su nombre, fecha de nacimiento y la fecha en que se recogió la muestra** en la etiqueta extraíble.
- **RECUERDE INCLUIR LA FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA.**
- Despegue la etiqueta de allí y utilícela para volver a sellar la solapa.

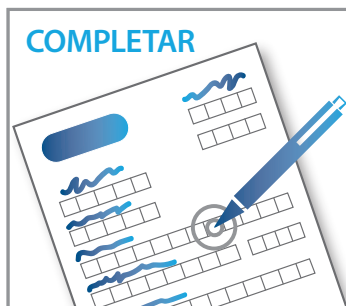

PASO 8

- Complete el formulario de respuesta.
- Coloque la tarjeta de la prueba y el formulario de respuesta en el sobre de correo con franqueo pagado provisto.
- Si su profesional médico o el laboratorio le proporcionaron un formulario de solicitud de la prueba preimpreso, incluya el formulario también en el sobre de devolución.



PASO 9

- Devuelva al laboratorio o al consultorio del profesional médico indicado ya sea por correo o mediante entrega personal.
- La tarjeta de la prueba debe ser devuelta al laboratorio o al profesional médico indicado lo antes posible y dentro de los 14 días posteriores a la recolección de la muestra.
- El profesional médico le entregará los resultados.